

Zestaw do barwienia Tissue-Tek® H&E

*Technologia Sakura zapewnia
czyste i spójne barwienie*



continuous innovation for pathology






Zestaw do barwienia Tissue-Tek® H&E


Hematoksylina i eozyna (H&E) to technika barwienia najczęściej stosowana w rutynowych badaniach patomorfologicznych wykonywanych w ramach diagnostyki medycznej. Barwienie H&E nie jest jednak ustandaryzowane. Jakość i konsystencja używanych barwników H&E różni się w zależności od typu hematoksyliny, protokołu stosowanego przez laboratorium i wieku odczynników. Gotowy do użycia zestaw do barwienia Tissue-Tek H&E firmy Sakura został opracowany specjalnie z myślą o automacie Tissue-Tek Prisma Plus, aby zapewnić jednolite barwienie w laboratorium

Wyraźne i jednolite barwienie


Protokół Sakura® H&E zalecany dla automatu Prisma *Plus* minimalizuje zmienność procesu i zapewnia wyraźne, szybko barwione preparaty, aby ułatwić dokładną diagnozę. Zestaw H&E jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości w celu zapewnienia wyraźnych i jednolitych wyników barwienia. Pojedynczy zestaw może barwić do 2500 preparatów.

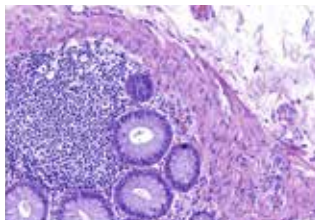


Jelito grube

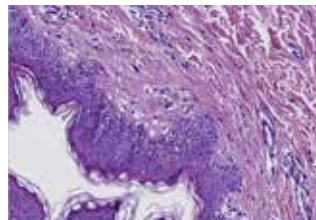

Skórka

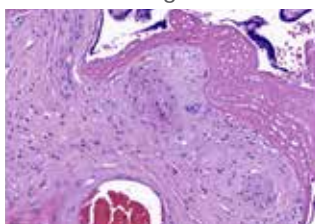

Łożysko

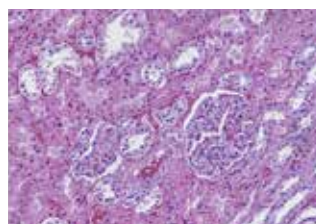

Nerka

Dwuskładnikowy roztwór hematoksyliny



Opracowaliśmy wyjątkowy system mieszania dwóch substancji zawierający hematoksylinę i utleniacz. Nasz system mieszania pozwala użytkownikowi określić datę przygotowania roztworu barwiącego, co ułatwia uzyskanie jednolitego koloru barwienia i eliminuje ryzyko osłabienia siły barwienia z czasem.

Zmieszanie obu składników przynajmniej 24 godziny przed użyciem pozwala w dowolnej chwili przygotować barwnik i ułatwia kontrolę siły barwienia. Zmieszany roztwór pozwala uzyskać wyraźnie i jednolicie zabarwione preparaty.

¹ Aby uzyskać zalecany protokół, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Sakura.

Zestaw do barwienia Tissue-Tek H&E

- Stała jakość, wydajność i szybkość barwienia*
- Rozwiązanie dwuskładnikowe
- Zsynchronizowana objętość do jednorazowego użytku w standardowym zbiorniku Prisma *Plus*
- Zarządzanie odczynnikami za pomocą kodu kreskowego

* W połączeniu z funkcją zarządzania liczbą preparatów.



Kod kreskowy do zarządzania odczynnikami

Każdy zestaw i składnik H&E jest oznaczony kodem kreskowym, aby umożliwić skanowanie numeru partii i daty ważności. Opcja podłączenia czytnika kodów kreskowych do Prisma *Plus* umożliwia zapewnienie identyfikowalności wyników barwienia. Teraz raport z barwienia zawiera informacje dotyczące zarządzania odczynnikami, takie jak nazwa roztworu, data ważności i numer partii wydrukowane na kodzie kreskowym opakowania.

Zsynchronizowana objętość do jednorazowego użytku

Roztwór do barwienia jest dostępny w jednorazowych opakowaniach zoptymalizowanych pod kątem standardowego zasobnika roztworu *Plus*.



Odwiedź nas na stronie www.sakura.com

Sakura Finetek Poland sp. z o.o., Grójecka Offices,
ul. Grójecka 208, 02-390 Warsaw, Poland

